

心電図の取り方



●記録前の準備

- ・ 消去ボタンを押す「ピーポーピーポーピーポー」と鳴ったら準備完了です。

※消去ボタンを押さない限り前のデータが残っています。



●心電図を記録

- ・ 左手を、手のひらを上にして、テーブルまたは膝の上に置く。
- ・ 電極部に穴の開いている方を下（左手側）にし、穴の開いていない方に右手を軽く乗せる。

※楽な体勢で左右どちらの手(腕)にも力が入っていない状態がベストです。



- ・ 記録／送信ボタンを強く押す。
- ・ 力を抜いてリラックスした状態で、動かさず約30秒間記録します。

※「ピーポロロ」と鳴って記録が始まり、音が止まったら記録が完了です。



心電図は心臓から出る微弱電流を記録するものですので、電極には軽く触れる程度で十分です。

強く挟んだり、腕に余計な力が入っていると、正確な情報が伝わらず、エラー(GN)の原因になってしまいます。

CG-2100は精密機器です！

測定中に喋ったり、動いたりするときれいな心電図が取れなかったり、測定エラーの原因になってしまいます。